

CHÂSSIS DE TRANSFERT ET DE SOINS HTS





CHÂSSIS DE TRANSFERT ET DE SOINS HTS ▶ ÜBERSICHT

Notre châssis de transfert et de soins HTS est un châssis supplémentaire pour la chaise de douche et de toilette Rifton HTS, qui permet de satisfaire encore mieux les exigences de l'utilisateur et de la personne accompagnatrice relatives au transfert et aux soins.

Les pédales situées des deux côtés du châssis permettent de régler la hauteur de 51 à 78 cm. Pour le régler en hauteur, «pompez» plusieurs fois de suite avec le pied sur la pédale. Pour l'abaisser, soulever tout simplement la pédale avec le pied.



La construction en acier inoxydable de qualité supérieure revêtu par poudre est un garant de longévité et de stabilité.

La fonction hydraulique solide du châssis est spécialement conçue pour l'usage dans des lieux humides.

Des roulettes doubles de 100 mm résistante à l'humidité permettent un transfert rapide et facile.



Le châssis de transfert et de soin complète la gamme d'accessoires déjà étendue du Rifton HTS. Ce siège pour salle de bains se règle facilement et rapidement à différentes hauteurs et facilite ainsi énormément le passage aux toilettes, le brossage de dents, la douche et toutes les activités de soins en général.

Pour tous les transferts, en fonction de siège de toilettes ou sous la douche, ce nouveau châssis n'impose aucun compromis en matière de hauteur !



Il n'élimine aucune des fonctions connues du châssis mobile déjà existant. Et le siège est inclinable également sur ce nouveau châssis – peu importe à quelle hauteur !



La base du Rifton HTS est un siège polyvalent réglable qui permet l'adaptation aux exigences individuelles grâce à une vaste gamme d'accessoires.

Les **rembourrages amovibles** sont en mousse intégrale résistante recouverte de polyuréthane et faciles à nettoyer.

La profondeur d'assise du **siège polyvalent** est réglable et combinable avec les conceptions de châssis les plus diverses.

Les **pelotes de bassin** permettent d'adapter la largeur du siège de 5 à 10 cm.



Les **accoudoirs** offrent le soutien requis et servent d'accueil aux pelotes de bassin.

Le **repose-mollets** soutient l'utilisateur à hauteur des mollets en complément du repose-pieds.

Le **repose-pieds** est réglable en hauteur et relevable pour le transfert. Les attaches pour pieds sont faciles à monter.



Le siège du Rifton HTS est combinable avec un grand nombre de châssis différents et permet ainsi de réaliser une configuration parfaite correspondant à chaque exigence.

La **plaque de fixation** permet de monter le siège du Rifton HTS sur tout modèle courant de siège de toilette. La plaque de fixation peut rester durablement fixé sur le siège des toilettes sans restreindre l'utilisation des toilettes sans siège HTS.



En combinaison avec le **châssis de transfert et de soins HTS**, le Rifton HTS est utilisable comme siège autonome de toilette ou de douche. Les adaptations en hauteur sont faciles à exécuter. L'inclinaison de l'assise se règle également pendant que l'utilisateur est sur le siège au moyen d'un vérin à gaz.



Avec le **châssis mobile**, le Rifton HTS peut également être utilisé comme siège autonome de toilette et de douche. La hauteur de l'assise est réglable sur le châssis avant l'utilisation. L'inclinaison de l'assise se règle également pendant que l'utilisateur est sur le siège au moyen d'un vérin à gaz.



Le **châssis fixe** convient notamment à un utilisateur qui veut effectuer le transfert seul, opération qui impose un réglage bas de la hauteur de siège. En outre, les dimensions de base sont réduites au minimum.



Combiné avec le **châssis pour baignoire**, le siège est utilisable comme siège de douche et de baignoire.



Le **châssis de voyage** permet d'emporter le Rifton HTS en vacances par exemple. Ce châssis léger et pliant est livré avec son sac de transport.



RIFTON HTS ▶ ACCESSOIRES



Châssis de transfert et de soins HTS



Châssis pour baignoire



Rembourrages fermés et ouverts



Pelotes de bassin



Châssis mobile



Châssis de voyage



Pelotes thoraciques



Tablette



Châssis fixe



Accoudoirs



Harnais



Appui-tête anatomique



Défecteur standard



Pot



Attaches pour pieds



Défecteur grande protection



Repose-pieds



Poignées de poussée



Plot d'abduction



Repose-mollets



Plaque de fixation

PRODUITS ► VUE D'ENSEMBLE

ASSISE + POSITIONNEMENT



SMILLA



SOFIE



MADITA



MADITA-Fun



MADITA-Fun mini



MADITA Maxi



Activity Chair



TINA

TRANSPORT + DÉPLACEMENT



SASCHA



SIGGI Isofix



SIGGI Combi



SIGGI III Fix



FREDDY



FLOYD



FRIDOLIN 1



FRIDOLIN 2



FRIDOLIN Maxi



FRANKA



Tom 5 Streefer



CORZO Xcountry

MARCHER + ROULER



MALTE



MALTE Outdoor



MARCY



Dynamic Pacer



Pacer



MOMO Tricycle



FollowMeMOMO



MOMO Vélo thérapeutique

VERTICALISATION



TODD



TIM



Hip



BORIS



HTS



Wave



BASTI



BIBI

BAIN + TOILETTE

Schuchmann GmbH & Co. KG

Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen

Tel. 0 54 05 909 - 0 · Fax 0 54 05 909 - 109

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de



www.facebook.com/schuchmannreha



www.schuchmann-reha.de/newsletter


schuchmann