


Instructions de montage.



Montage de la chaise thérapeutique **smilla**.
T.0 et T.1 à la livraison

Instructions.

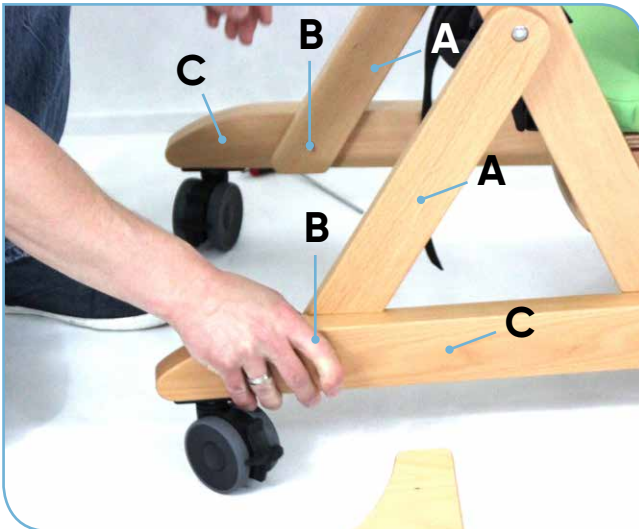


1ère étape: Montage de l'entretoise

Levez la smilla. en faisant glisser l'unité arrière vers le haut.


Faites glisser les barres de support (A) à gauche et à droite au ras des trous (B) des deux côtés intérieurs des pieds (C).

Insérez les vis à tête plate M6x70 (E) fournies à l'extérieur dans les trous du pied (C) et des barres de support (A). Ne le serrez pas encore.

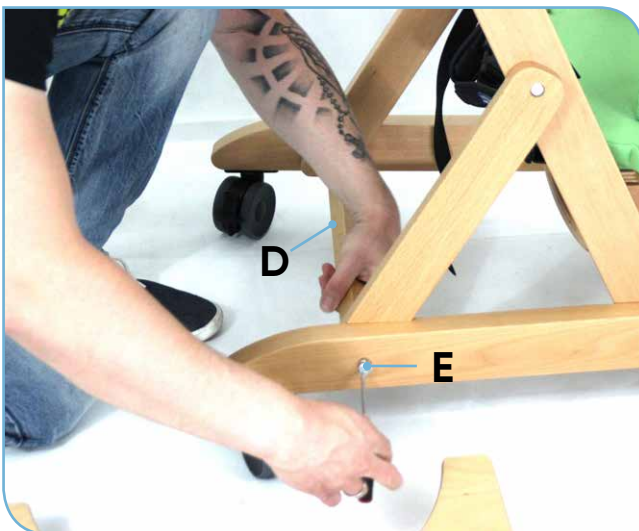


Insérez maintenant l'entretoise (D) à l'arrière entre les pieds de la **smilla**. de façon à ce que les trous se chevauchent.

Serrer maintenant les vis à tête plate M6x70 (E).

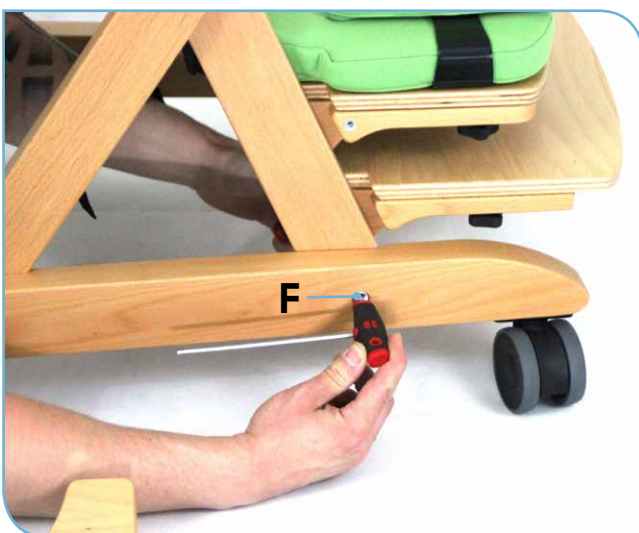


2ème étape: Vissage des vis

Serrez les vis à tête plate déjà préassemblées M6x40 (F) dans la zone avant.

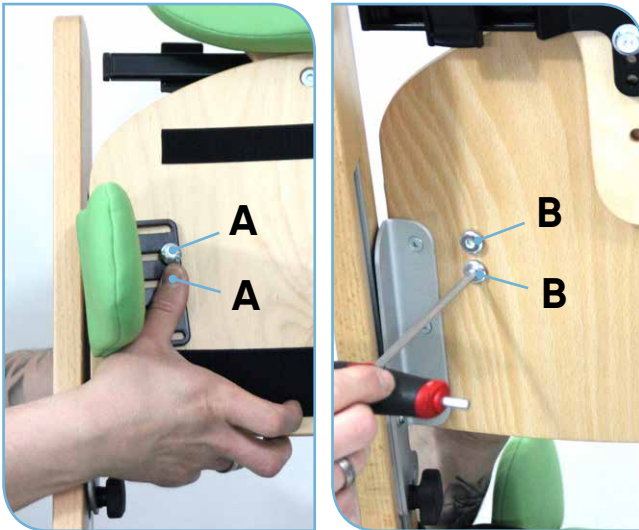


**3ème étape:
Assemblage des pelotes thoraciques**

Retirez le rembourrage du dossier et insérez les pelotes thoracique dans la position souhaitée sur les trous du dossier. Insérez les deux vis à tête plate M6x12 (A) par l'avant à travers le support thoracique et le trou et alignez-les avec les écrous M6x10 (B) à l'arrière du dossier. Remettez ensuite le rembourrage.

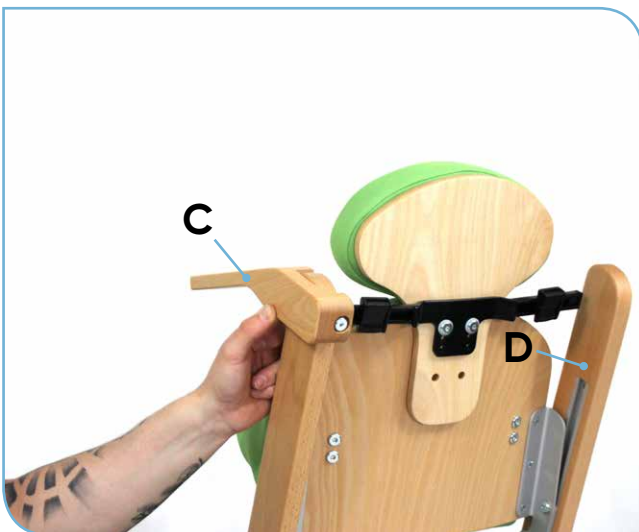

**4ème étape:
Installation des accoudoirs**

Faites glisser les accoudoirs (C) sur les supports (D) de chaque côtés.

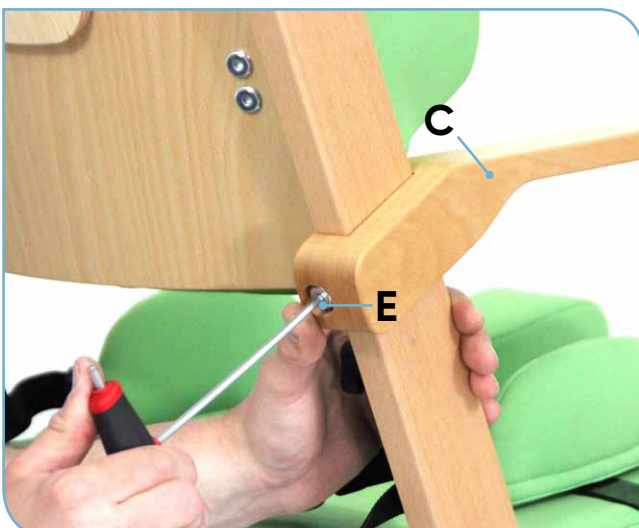

Amener l'accoudoir (C) à la hauteur désirée fixer avec la vis à tête plate M6x20 (E).

